



**DiaCare ekibi**

Pzt - Cum, 08.30 - 17.00

0800 - 022 18 58

[diacare@mediq.com](mailto:diacare@mediq.com)

[diacare.nl](http://diacare.nl)

# diacare



(TÜRKÇE)

## CareSens Kurulum Talimat Kartı

### Adım 1 - Kurulum için ihtiyaç duyacaklarınız

Başlamak için kan şekeri ölçüm cihazı başlangıç kiti, akıllı telefonunuz ve kullanıcı adınız ile parolanızı içeren karşılama e-postasına ihtiyacınız vardır.



### Adım 2 - Uygulamayı indirin

MediQ DiaCare uygulamasını **App Store** veya **Google Play Store** üzerinden indirebilirsiniz.



### Adım 3 - Giriş bilgilerinizi girin

Kullanıcı adı ve parolanızı girin. Bu bilgiler size gönderilen karşılama e-postasında bulunmaktadır.



### Adım 4 - PIN kodunuzu seçin

Uygulamanın güvenliğini sağlamak için DiaCare'e giriş yaparken kullanacağınız beş haneli bir PIN kodu seçmeniz istenecektir.




### Adım 5 - Ölçüm cihazınızı uygulamaya bağlayın

Bu uygulama ölçüm cihazına nasıl bağlanacağını anlatan talimatlar verecektir. Sorun mu yaşıyorsunuz ya da talimatlarla birlikte okumak ister misiniz? Adımların hepsini görüp kendi istediğiniz vakitte tekrar üzerinden geçmek için buraya tıklayın.



### Adım 6 - Hedef değerlerinizi yapılandırın

- DiaCare uygulamasını açın. PIN kodunuzu girin.
- Ayarlar menüsüne gidin ve istiyorsanız hedef değerleri değiştirin. Örneğin:
  - Kan şekeri marjı 3,5'in altında
  - Kan şekeri alt limiti 4,0
  - Kan şekeri üst limiti 7,0
  - Kan şekeri marjı 7,4'ün üstünde
- OK ögesine tıklayın ve **"ga door"** üzerine tıklayarak seçiminizi onaylayın

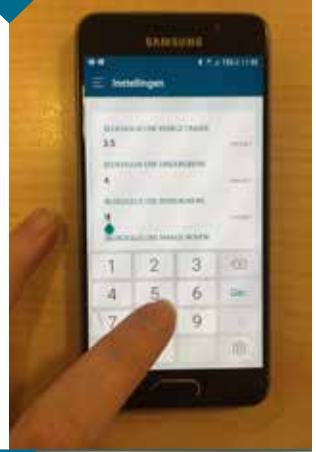

### Adım 7 - Ölçümleri alın

Bir ölçüm yaptıysanız ölçüm şeridini çıkardıktan sonra ekranın ortasından aşağı doğru kaydırabilirsiniz. Bunun ardından ölçüm uygulamada görüntülenecektir.



### Adım 7b - Ölçümleri uygulamaya gönderin

Kan şekeri ölçüm cihazınızın üzerindeki sağ oku "bT SEnd" yazısı ekranda görünene kadar 3 saniye basılı tutun. Şimdi uygulamada ekranın ortasından aşağı doğru kaydırın. Henüz senkronize edilmemiş ölçümler uygulamada görüntülenecektir.

